



#울트라토닝 #물방울리프팅 #1/3MHz #3/10MHz #듀얼초음파
#4MHz 고주파 #탄력, 미백, 회복 올인원 테라피 #10 분스킨부스팅관리

필로샤인 울트라토닝 FILLOSHINE ULTRATONING

연구개발배경 Development Story



울트라토닝 기기는 주파수 1MHz/3MHz/10MHz 인 초음파 핸드피스 2 종과 4MHz 인 고주파 핸드피스 1 종을 탑재한 피부 개선에 도움을 주는 미용 기기입니다.

울트라토닝 기기의 초음파 핸드피스 2 종의 침투 깊이는 고객의 피부 상태 및 사용부위(얼굴 및 바디)에 따라 선택적인 시술이 가능하게 설계되었습니다.
한 가지 주파수 또는 두 가지 주파수의 교차 시술도 가능합니다.

두 가지 주파수를 교차 시술하는 방식은 결합 조직과 세포 구조에 작용하는 특별한 압력 변화를 생성하게 됩니다.
이는, 기존 필로샤인의 스킨 부스팅 테라피가 추구하는 피부 겉면에 만져지고 보이는 표피만 관리하는 것이 아닌 피부를 구성하고 있는 콜라겐, 엘라스틴, 섬유아세포 등 다양한 조직들이 에너지를 받아 재생을 촉진하여 피부 속과 겉을 함께 관리해 줍니다.

주름 탄력 집중 케어가 가능한 고주파 핸드피스까지 더해진 울트라토닝 기기로 보다 효과적인 관리를 경험해보시기 바랍니다.

기기상세소개 PRODUCT INFORMATION



| 기기효능 Effect

울트라토닝 기기의 총 3 가지 핸드피스로 피부 미백, 잔주름, 안면 홍조 및 난치성 여드름 개선, 레이저 전후 재생 촉진, 콜라겐 생성 촉진, 셀룰라이트 분해 등의 다양한 효과를 기대할 수 있습니다.

| 기기특징 Features

(1) 두 가지 주파수 교차 조사

울트라토닝 기기의 초음파 침투 깊이는 고객의 피부 상태에 따라 한 가지 주파수 조사 또는 두 가지 주파수를 교차 조사하는 선택적인 기술이 가능하게 설계되어 맞춤 기술이 가능합니다.

두 가지 주파수를 교차 조사하는 방식은 결합 조직과 세포 구조에 작용하는 특별한 압력 변화를 생성하여 피부 겉과 속을 함께 케어할 수 있습니다.

(2) 고주파 기능

4.0MHz 고주파는 빠른 속도로 열을 39 도에서 45 도까지 증가시키는 기능이 있어 낮은 대역대의 고주파에서는 볼 수 없는 효과를 나타낼 수 있습니다.

피부 속 진피층에 열에너지 효과로 콜라겐을 자극시켜 주름 개선과 더불어 탄력 증가 효과를 기대할 수 있습니다.

| 기기프로그램 Program

페이스

AUTO	모드	적응증	시간	강도
FACE	Tightening	탄력, 리프팅	18 분	2~3
얼굴	Hydration	수분 공급, 건조증	12 분	1~2
	Acne Scar	여드름 색소, 흉터	18 분	3~4
	Contusion Swelling	부종, 멍	6 분	1~2
	Acne	면포성 / 화농성 여드름	12 분	1~2
	Sedation Flush	홍조, 붉음증	12 분	1~2
	Sonophoresis	영양공급	6 분	1~2

* 본 프로그램은 여러 임상을 통해 울트라토닝의 가장 효과적인 시간과 강도를 매뉴얼화한 것입니다.

바디

AUTO	모드	적응증	시간	강도
BODY	Tightening	탄력, 리프팅	10 분	3~4
몸	Hydration	수분 공급, 건조증	10 분	3~4
	Sonophoresis	영양공급	10 분	3~4

고주파

MODE	적응증	시간	강도
RF(링클케어 전용)	주름에 대한 적응증입니다. (이마, 미간, 팔자, 눈가, 눈 밑, 다크서클)	10 분	4~7

| 시술 후 관리도 중요합니다.

1. 시술 후 1주 동안 사우나 및 찜질방은 피해주세요.
2. 시술 후 1주 동안 스크럽제 등 각질 제거는 피해주세요.
3. 외출 시 자외선 차단제를 발라주세요.
4. 재생을 돕기 위한 수분, 재생 크림을 충분히 발라주세요.
5. 시술 후 일시적인 붉음증 및 따가움이 발생할 수 있습니다.
6. 시술 후 각질이 발생한 경우 손으로 뜯거나 긁지 마시고, 자연적으로 탈락할 수 있도록 해주세요.

에디터 소감 EDITOR'S SUMMARY



피부진단과 상담을 통해 얻은 고객의 문제점을 세팅화된 프로그램을 통해 쉽고 간편하게 시술할 수 있으며, Auto 상태에서도 시간과 강도를 수동으로 추가 조절할 수 있어 피부 타입별, 피부 두께나 에너지에 대한 민감도에 따라 다양한 맞춤형 시술이 가능합니다.

울트라토닝은 필로샤인의 스킨 부스팅 제품과
 가장 적합하게 콤바인 될 수 있는 기기라고 볼 수 있습니다.
 이는 울트라 사운드라는 원리에서 Hz, Khz 가 아닌 Mhz 에서 올 수 있는
 교차 에너지의 초당 수백만 개의 진동에너지가
 피부에 최소 데미지로 유효성분을 3~30mm 까지 전달하면서
 진피층 세포들을 활성화 시켜 솔루션을 더욱 잘 받아들이고
 효능을 더욱 오랜 시간 유지할 수 있게 해줍니다.

티타늄성분으로 커팅된 도자와 다양한 테스트를 통해 만들어진 그립감의
 총 3 가지 핸드피스가 피부, 바디, 미세관리(눈가 등)를 가능하게 하여
 피부 미백, 잔주름 개선, 레이저 후 재생촉진, 셀룰라이트 분해,
 안면홍조 개선, 콜라겐 생성 촉진 등의 다양한 효과를 경험할 수 있습니다.

필로샤인 브랜드의 취지와 같이 피부 속 세포부터 개선하여
 피부조직에 유효성분 및 물리적 자극을 주는 방법으로
 더욱 건강한 28 일 turnover 주기를 맞이할 수 있도록 구성하였습니다.