



#피지제거 #모공관리 #각질제거 #모공 청소 단계 #아쿠아 필링
#노폐물, 블랙헤드, 피지 OUT #영양 및 진정 솔루션 IN

필로샤인 울트라스파 FILLOSHINE ULTRASPA

(Power Cable*1ea, Handpiece*1ea, Air Brush Set*1, Air Brush Hose*1ea,
Tip(L, S)*2ea, Empty Bottle for Cleaning&Serum*1ea)

연구개발배경 Development Story



블랙헤드, 화이트헤드로 makeup이 잘되지 않는다!
 각질 및 노폐물을 시원하게 청소하고 싶다!
 노폐물 제거와 수분, 영양공급이 동시에 필요하다!
 초기 여드름을 예방하고 관리할 수 있는 케어가 필요하다!

피부에 각질이 쌓이면 모공을 막으면서 체외로 노폐물이 배출되지 못해
 각종 피부 트러블을 유발하게 됩니다.
 울트라스파는 피부의 각질과 노폐물만을 녹여내어
 전반적인 피부 잡티나 어두운 피부 톤을 개선할 수 있습니다.

수분과 영양 IN & 각질과 노폐물 OUT
 똑똑한 피부 청결, 울트라스파와 함께 하시기 바랍니다.

기기상세소개 PRODUCT INFORMATION



| 기기효능 Effect

울트라스파는 묵은 각질, 피지 제거, 모낭충 감소와 동시에
수분 및 영양공급이 가능한 장비입니다.

피부의 불필요한 각질과 모공 속 노폐물을 제거하여 블랙헤드, 화이트헤드가 될 수 있는
요인을 예방하고, 피지를 먹고사는 모낭충을 감소시키는 데 도움을 줍니다.

또한, 수분과 영양을 공급해 촉촉한 피부로 개선할 수 있는
필로샤인 E1, E2, E3 솔루션 시리즈를 컴바인하여
최소한의 자극으로 보이지 않는 노폐물 등을 제거합니다.

추가적으로, 타 장비와는 다르게 총 4 가지 솔루션의 탑재가 가능하여
기존에 사용하고 있는 토너(솔루션)를 추가로 삽입하여 Serum 용도로 맞춤형 관리가 가능합니다.

뿐만 아니라, 스프레이건 핸드피스까지 더해져 건조한 피부에 즉각적으로
사각지대 없이 촉촉하게 분사할 수 있어 필링과 영양공급이 동시에 가능합니다.

| 기기특징 Features

(1) 매끈하고 반짝이는 피부

울트라스파는 피부에 불필요하게 정체되어 있는 각질을 분해해서 효과적으로 흡입, 배출시키기 때문에 시술 직후에는 매우 매끈하고 반짝이는 피부와 메이크업이 잘 받는 기초 피부를 갖도록 도와줍니다.

(2) 수분과 영양을 동시에 공급

울트라스파는 기존 박피술과 달리 케미컬 필링제와 피부 유효성분을 동시에 사용하여 각질과 모공 속 노폐물을 제거하고 유효성분을 피부 속 깊숙히 주입시켜 충분한 수분과 영양을 공급해 촉촉함을 제공해 줍니다.

(3) 1 회 시술로도 건강한 피부 결 완성

울트라스파는 1 회 시술만으로도 얼굴의 과잉 피지, 블랙헤드, 화이트헤드, 각질을 확실하게 제거하여 매끄럽고 윤기나는 건강한 피부 결을 완성하는 데 도움을 줍니다.

(4) SMALL & LARGE TIP / 필로샤인 솔루션 3 종

필로샤인 AHA E1, BHA E2, MULTI E3 솔루션이 피부 타입에 따라 작용하여 전체적인 모공 청소 및 모공 속 노폐물에 대한 집중 청소가 단계 및 선택(Small 혹은 Large 사이즈 TIP 으로 교체)적으로 가능하므로 더욱 효과적으로 피부 속 진드기나 모낭충을 제거하는 데 도움을 줍니다.

(5) 스프레이건(에어브러시)를 통한 사각지대 없이 즉각적인 수분 보충

울트라스파에 탑재 된 스프레이건(에어브러시)에 솔루션을 삽입하여 시술 후 즉각적으로 진정 및 보습 작용에 도움을 줄 수 있도록 안개 분사되어 사용 후 일상생활이 가능하도록 도와줍니다.

| 솔루션 Solution



(1) 필로샤인 AHA E1 솔루션

필로샤인 AHA E1 솔루션에는 글리콜산이 함유되어 있어 각질제거에 도움을 주고 피부 정화를 돕는 역할을 합니다. 추가적으로 피부 속 노폐물을 제거하는 동시에 문제성 피부를 예방 및 관리하는 프로그램으로 보다 맑은 피부로 관리해 줍니다. 모든 피부 타입 사용 가능합니다.

(2) 필로샤인 BHA E2 솔루션

필로샤인 BHA E2 솔루션은 여드름성 피부와 U 존 및 T 존에 블랙&화이트헤드가 많은 타입의 피부에 적합한 솔루션으로 anti-trouble 에 도움을 주는 원료를 함유하여 모공 속 노폐물 및 피지 과다 분비를 제어하고 유수분밸런스를 맞춰줍니다. 지성, 여드름성, 복합성 피부에 모두 사용 가능합니다.

(3) 필로샤인 MULTI E3 솔루션

필로샤인 MULTI E3 솔루션은 울트라스파의 물리적인 필링으로부터 자극받을 수 있는 민감성 피부의 진정 및 필링 후의 모공 수축, 영양 공급에 사용되어 시너지 효과를 낼 수 있는 제품으로 병풀추출물, 판테놀, 알로에베라잎즙가루, 히알루론산 등이 함유되어 있습니다. 마무리 단계에 사용하여 피부 장벽 강화와 보습, 영양 공급에 도움을 줍니다. 모든 피부 타입 사용 가능합니다.

| 기기디스플레이 작동방법 Display Use manual

DISPLAY

① 시술종류, 시술시간, 시술레벨, 상태(STATUS)가 설정된 값으로 표시됩니다.

CONTROL TOUCH BUTTONS



② **POWER**
기기의 전원을 On/Off 할 수 있습니다.



⑤ **Spray 버튼**
Spray의 사용을 On/off 할 수 있습니다..



③ **PEELING MODE**
동작 종류(AHA, BHA, MULTI, SERUM, VENT, CLEAN)를 선택할 수 있습니다.



⑥ **SUCTION 다이얼**
시술 중 석션의 압력을 조절 할 수 있습니다.



④ **Start/Stop 버튼**
시술의 시작과 일시정지를 선택 할 수 있습니다.
OPERATE/STANDBY로 표시됩니다.



⑦ **유량 조절 다이얼**
시술 중 화장품의 유량을 조절 할 수 있습니다.



⑧ **시간조절 버튼**
시술 시간을 조절 할 수 있습니다.

1. Display 를 작동하여 시술 프로그램을 셋팅합니다.
2. 솔루션이 잘 나오는지 시술자의 손등에 사전 확인합니다.
3. 고객으로부터 석션의 강도를 확인합니다.
4. 밑에서 위로 끌어올리면서 시술합니다.
5. 블랙헤드, 화이트헤드, 각질, 피지 등 모든 노폐물을 제거합니다.
- * 집중 관리가 필요한 곳은 TIP 을 SMALL 로 교체하여 관리합니다.
6. 얼굴 전체를 꼼꼼하게 시술합니다.
7. 턱 라인을 정교하게 시술합니다.

| 시술 후 관리도 중요합니다.

1. 시술 후 1 주 동안 사우나 및 찜질방은 피해주세요.
2. 시술 후 1 주 동안 스크럽제 등 각질 제거는 피해주세요.
3. 외출 시 자외선 차단제를 발라주세요.
4. 재생을 돕기 위한 수분, 재생 크림을 충분히 발라주세요.
5. 시술 후 일시적인 붉음증 및 따가움이 발생할 수 있습니다.

6. 시술 후 각질이 발생한 경우 손으로 뜯거나 긁지 마시고,
자연적으로 탈락할 수 있도록 해주세요.

에디터 소감 EDITOR'S SUMMARY



울트라스파는 기존 회오리형이 아닌 지그재그형의 신규 금형을 통해 개발된
2 가지 사이즈의 팁이 탑재되어 있어
더욱 효율적으로 피부 각질 및 노폐물을 제거할 수 있습니다.
본 기기에 사용되는 필링 및 세럼 솔루션을 이용하여
각질을 녹이고 수분과 영양을 공급함과 동시에
석션 기능으로 노폐물을 흡입함으로써 깨끗하고 건강한 피부 청결이 가능합니다.

피부 타입에 맞는 필링 제품(AHA/E1, BHA/E2)을 이용하여
표피에 쌓인 노폐물 및 각질을 제거하는 데 탁월한 효과가 있습니다.
클렌징 시술 후에는 세럼 솔루션을 이용하여
시술 후 민감해진 피부에 보습 및 영양을 공급해 줄 수 있습니다.

모공 속 피지, 노폐물, 모낭충은 물론 블랙헤드, 화이트헤드까지 제거하여
피부 트러블 및 여드름 개선 및 예방에도 효과적입니다.

스프레이건(에어브러시)에 점도가 낮은 솔루션을 삽입하여
작은 입자로 얼굴에 사각지대 없이 골고루 분사하여
시술 후 즉각적인 보습 및 진정관리가 가능하고
얼굴을 비롯한 목, 트러블이 있는 두피에도 사용 가능한 특징이 있습니다.

터치형으로 구성된 디스플레이 화면은 필링 모드, 시간 조절이 용이하고
회전형 다이얼은 석션과 솔루션의 유량을 편리하게 조절할 수 있어
시술자와 관리받는 고객이 느낄 수 있는 리드타임 등 다방면에서 불편함을 최소화했습니다.